


Anleitung zur Blutentnahme

und zum Versand der Blutproben für die Liquid Biopsy


Für die Blutentnahme benötigtes Material

- 3x cfDNA Exact Monovetten und Multiflykanüle
- Leerröhrchen („Verwerfröhrchen“) und Venenstaubinde
- Anforderungsschein mit Klebebarcode und Versandbeutel


Entnahmeanleitung

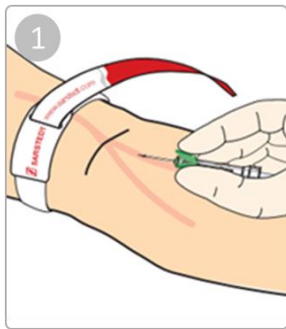


Venenstaubinde anlegen und Venenpunktion durchführen.

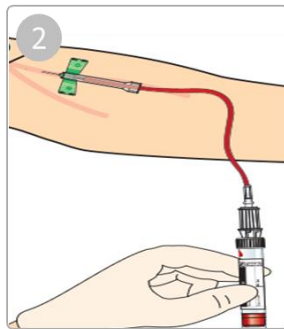


Verwerfröhrchen ankopeln und die Safety-Multifly-Kanüle mit Blut befüllen.

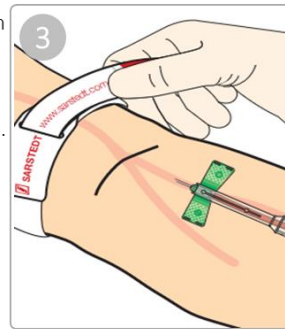


Venenstaubinde lösen, Verwerfröhrchen befüllen und entfernen.

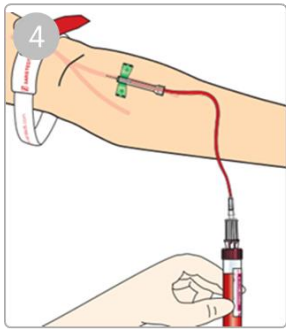

cfDNA Exact Monovette senkrecht, unterhalb des Armniveaus ankopeln und durch Aufziehen befüllen.

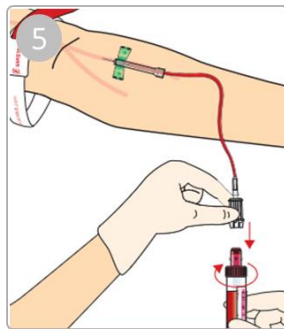

Röhrchen entkoppeln und mit Verschlusskappe verschließen.

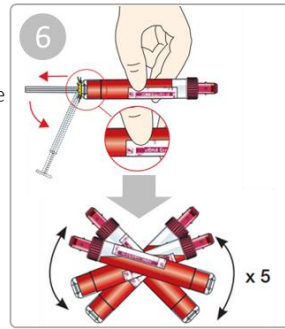

Kolbenstange in Einrastposition ziehen („Knack“) und abbrechen. Durch 5x Überkopfschwenken Präparierung mischen.

Achtung: Die Stabilisatorlösung ist gesundheitsschädlich. Befolgen Sie daher unbedingt diese Anleitung und verwenden Sie ausschließlich die hier angegebenen Materialien.

Abnahmereihenfolge

- Bei Entnahme unterschiedlicher Materialien die cfDNA Exact Monovette immer zuletzt abnehmen.

Beschriftung

- Bitte beschriften Sie das Entnahmeröhrchen mit Vor- und Zunamen, sowie Geburtsdatum und versehen Sie es mit dem Barcodeaufkleber.
- Bitte geben Sie **ZWINGEND** das Entnahmedatum an. Nur so können wir dokumentieren, dass die Haltbarkeit der Probe bei Analysebeginn nicht überschritten ist.

Probenlagerung und Versand

- Die Probe kann bei Raumtemperatur gelagert werden (nicht unter 6°C und nicht über 37°C). Die Haltbarkeit des Materials bis zum Beginn der Analytik beträgt 5 Tage nach Entnahme.
- Bei Versand über einen Fahrdienst der Limbach Gruppe die Blutröhrchen inkl. Anforderungsschein in den dafür vorgesehenen Transportbeutel stecken und einfach Ihrem Kurierdienst mitgeben.
- Bei Postversand unbedingt die Verpackungsanweisung für biologische Proben (P650) beachten und Schutzgefäße mit saugfähiger Einlage verwenden.



Anforderungsscheine und Bestellungen

Link zum Anforderungsschein



Link zum Bestellformular



Ihre Ansprechpartner

Bestellung von Abnahmesets:

Bitte senden Sie uns ihre ausgefüllten
Bestellformulare an

✉ versand@laborvolkmann.de
oder
☎ 0721-85000-269

Einsender Betreuung

Frau Brussmann
0721-85000-248

Befundauskünfte

Telefonzentrale
0721 85000-0

Technisch-/Methodische Fragen

Herr Dipl. Biol. Fabian Ripp
072185000-104

Medizinische Fragen

Herr Dr. med. Nicolas Thornton
0721 85000-296

Herr Dr. med. Bernhard Miller
0721 85000-192

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Labor Volkmann in Karlsruhe

