


Anleitung zur Blutentnahme

und zum Versand der Blutproben für die Liquid Biopsy

Für die Blutentnahme benötigtes Material

- 3x cfDNA Exact Monovetten und Multiflykanüle
- Leerröhrchen und Venenstaubinde
- Anforderungsschein mit Klebebarcode und Versandbeutel

Entnahmeanleitung

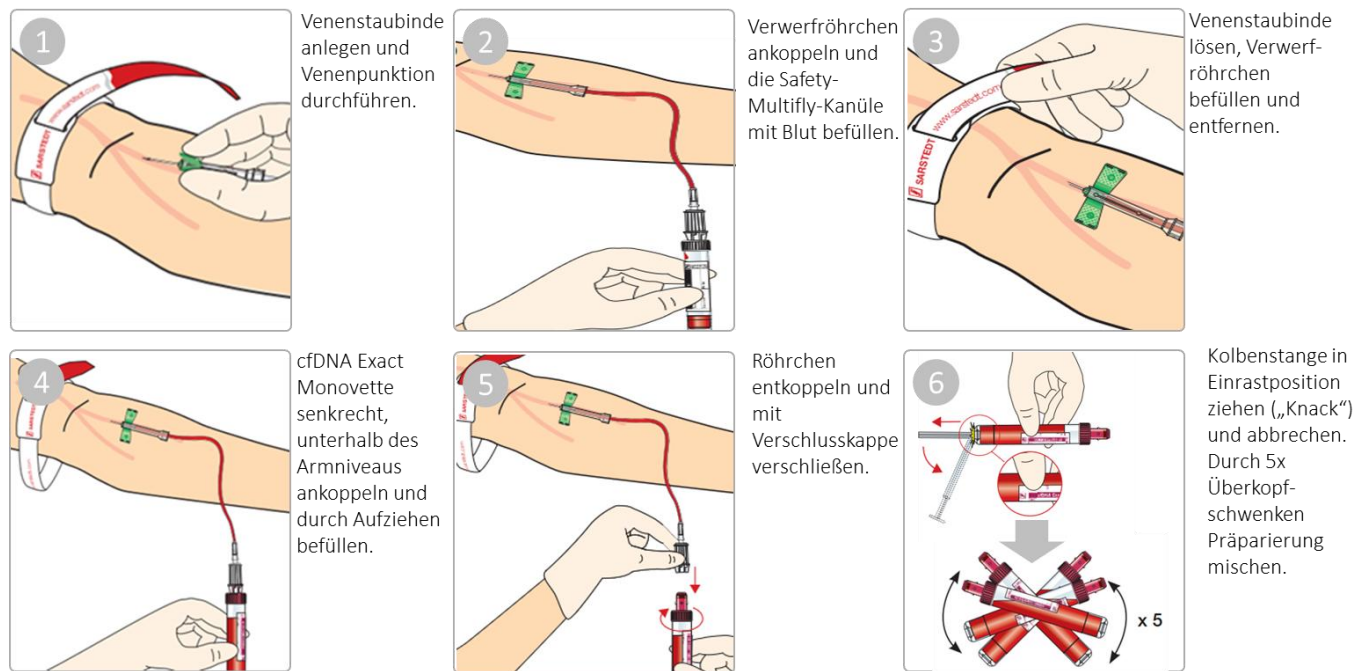

Achtung: Die Stabilisatorlösung ist gesundheitsschädlich. Befolgen Sie daher unbedingt diese Anleitung und verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Materialien.

Abnahmereihenfolge

- Bei Mehrfachabnahme cfDNA Exact Monovette immer zuletzt abnehmen.

Beschriftung

- Bitte beschriften Sie das Entnahmeröhrchen mit Vor- und Zunamen, sowie Geburtsdatum und kleben Sie den Barcodeaufkleber auf.
- Bitte geben Sie **ZWINGEND** das Entnahmedatum an. Nur so können wir gewährleisten, dass die Haltbarkeit der Probe bei Analysebeginn nicht überschritten ist.

Probenlagerung und Versand

- Die Probe kann bei Raumtemperatur gelagert werden (nicht unter 6°C und nicht über 37°C). Die Haltbarkeit des Materials beträgt 5 Tage, spätestens dann sollte im Labor die Plasmaisolation erfolgen.
- Bei Versand über einen Fahrdienst der Limbach Gruppe die Blutröhrchen inkl. Anforderungsschein in den dafür vorgesehenen Transportbeutel stecken. Der Labor-Fahrdienst wird die Probe wie gewohnt mitnehmen.
- Bei Postversand unbedingt die Verpackungsanweisung für biologische Proben (P650) beachten und Schutzgefäß mit saugfähiger Einlage verwenden..



Anforderungsscheine und Bestellungen

Link zum Anforderungsschein



Link zum Bestellformular



Ihre Ansprechpartner

Bestellung von Abnahmesets:

Bitte senden Sie uns ihre ausgefüllten
Bestellformulare an

✉ versand@laborvolkmann.de
oder
☎ 0721-85000-269

Einsender Betreuung

Frau Brussmann
0721-85000-248

Befundauskünfte

Telefonzentrale
0721 85000-0

Technisch-/Methodische Fragen

Herr Dipl. Biol. Fabian Ripp
072185000-104

Medizinische Fragen

Herr Dr. med. Nicolas Thornton
0721 85000-296

Herr Dr. med. Bernhard Miller
0721 85000-192

Mit freundlichen Grüßen,



MVZ Labor Volkmann
KARLSRUHE

MVZ Labor PD Dr. Volkmann und Kollegen SE & Co. eGmbH
Gerwigstraße, 63, 76131 Karlsruhe
Tel.: +49 721 85000-0
www.laborvolkmann.de

LIMBACH  GRUPPE

Ihr Labor Volkmann in Karlsruhe



MVZ Labor Volkmann
KARLSRUHE

MVZ Labor PD Dr. Volkmann und Kollegen GbR
Gerwigstraße. 63, 76131 Karlsruhe
Tel.: +49 721 85000-0
www.laborvolkmann.de

LIMBACH  GRUPPE